


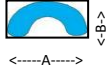










Produktguide Tumle hygien

Positioneringskuddar för hygiensituation

Modell	Produktnamn	Artikelnummer	Mått cm 	Beskrivning
	Hygienhalvmåne	3002-9601-000	Länd (A): 46 Bredd (B): 22	Litet, stabilt stöd längs bålen i hygienstol eller nackstöd på duschbrits.
	Nackflytkudde	3002-9911-000	Längd (A): 54 Bredd (B): 38	Kompletterar befintligt huvudstöd i hygienstol eller på duschbrits. Stabiliserar och centrerar huvud/nacke.
	Bananflytkudde S	3002-9811-000	Längd (A): 85 Bredd (B): 53	Stöd under förlamad arm och i sidan av överkroppen. Underarmsstöd för båda armarna i knät. Utfyllnad bakom nacke och axlar.
	Bananflytkudde M	3002-9111-000	Längd (A): 104 Bredd (B): 67	Banankudde M och L stödjer hela kroppen både i hygienstol och duschbrits. Fungerar som utfyllnad för att stabilisera kring en smal person. Placeras bakom nacken och stödjer överkroppen på varje sida instoppad innanför armstöden. Alternativt kan den placeras från nacken och ner under ena armen framför personen. Stödjer längs med kroppen för att få ett säkert magliggande i duschbrits vid tvätt av ryggen.
	Bananflytkudde L	3002-9101-000	Längd (A): 116 Bredd (B): 78	
	T-flytkudde S	3002-9027-000	Längd (A): 60 Bredd (B): 38	T-kuddar separerar/centrerar och stabiliserar ben och fötter både i hygienstol och på duschbrits. Ger stöd för felställda fötter och fyller ut om man inte når ned ordentligt.
	T-flytkudde L	3002-9017-000	Längd (A): 81 Bredd (B): 52	
	Supportflytkudde S	3002-9620-000	Längd (A): 63 Bredd (B): 52	Placera den platta mellandelen på kudden mellan rygg och ryggstöd för att få ett mjukt och stabilt bålstöd.
	Supportflytkudde L	3002-9630-000	Längd (A): 83 Bredd (B): 28	När kudden placeras med den platta delen under låren ger den ett bra stöd för att förhindra att benen faller ut åt sidan.
	Tvättpåse S	3002-9802-000	Längd: 52 Bredd: 38	S passar för 3002-9601-000, 3002-9911-000 & 3002-9027-000 i vanlig tvättmaskin.
	Tvättpåse M	3002-9803-000	Längd: 66 Bredd: 52	M passar för 3002-9811-000 och 3002-9017-000 i vanlig tvättmaskin.
	Tvättpåse L	3002-9803-000	Längd: 74 Bredd: 72	L passar för 3002-9111-000 och 3002-9101-000.

Produktinformation

Fyllnadsmaterial: Polystyren Ytterhölje: Polyestertyg och polyester

Skötselråd: Efter varje användning, spola igenom kudden noga. Dropptorka så fort som möjligt. Alternativ använd torkskåp max 60°C. Vid behov kan kudden tvättas i maskin max 60°C. Tvättpåse ska användas. Vanligt förekommande tvättmedel för hushåll kan användas. Använd INTE sköljmedel.

Temperaturer över 70°C skadar kuddens fyllning.