



## PRODUKTINFORMATION

# Cobi Sky madrass

## - till de svåra positioneringarna

**Cobi Sky madrassen är utvecklad för att ge tryckfördelning, stabilitet och komfort.**

Cobi Sky madrassen används på omsorgsboenden och i hemmamiljö till användare med neurologiska diagnoser, smärtor och instabila frakturer, där behovet för tryckavlastning föreligger.

Användarvikt från 30 kg.



- Formbar madrass till mikropositionering.
- Lätt att installera, ingen pump.
- Trycksårsförebyggande och avlastande.
- Skumram som ger stabilitet.
- Töjbart och andningsbart inkontinensöverdrag.
- Perforerat mellanskikt som ger optimal ventilation.



## Cobi Sky madrass

### Konstruktion - madrass

Cobi Sky är en helmadrass med flera lager. Det översta lagret består av ett överdrag bestående av små Kröyerkulor. Överdraget är sytt i kanaler, vilket gör så att innehållet i varje enskild kanal kan förflyttas. Det betyder att madrassen kan formas precis i den position användaren har behov av.

Användaren sjunker ned i madrassen något som ger optimalt stöd och tryckavlastning, samtidigt som risken för skjuvning minskar.

Under lagret med kanaler och Kröyerkulor finns en fjädrande mittdel med perforeringar. Dessa ger en optimal ventilation av madrassen.


En skumram runt om och under de två lagren ger en stabilitet när användaren sitter på sängkanten.

### Användning

#### Förflytta fyllningen

Cobi Sky klarar de positioneringsutmaningar som kan uppstå utan att kompromissa på stabiliteten.

Det beror bland annat på madrassens uppbyggnad med kanaler som kan förflyttas runt. På så sätt kan madrassen formas utifrån det behov som användaren har.

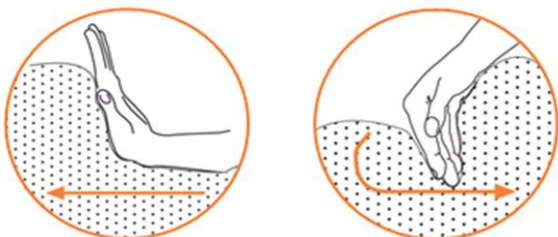

#### Avlastande positionering

Vid situationer där det redan föreligger ett trycksår kan man skapa en fördjupning genom att förflytta fyllningen med kulor. Forma en fördjupning med handen under det ställe där avlastningen önskas.

Fördjupningen kan slätas ut igen när behovet av avlastning inte föreligger längre.

#### Rengöring och underhåll

Daglig rengöring av det heltäckande överdraget kan ske med vatten och rengöringsmedel. Avtorkning med en torr trasa. Överdraget kan också desinficeras med ytdesinfektion.

Det grå överdraget kan tvättas i maskin vid 60° och torkas i torktumlare på låg värme, eller

### Överdrag

Det grå överdraget kring madrassen är ett inkontinensöverdrag som är töjbart, andningsbart och går att tvätta. Överdraget täcker hela madrassen och stängs med ett blixtlås.

Överdraget sitter löst, vilket tillåter omsorgspersonal att förflytta och forma fyllningen i madrassen utan att överdragets stramhet upphäver fyllningens placering och funktion.

Det vita inre överdraget är ett tunt, flexibelt och töjbart lycraöverdrag.

hängas upp tills det torkat. Överdraget får inte strykas.

Det vita inre överdraget har en hållbarhet på 8 tvättar. Det inre överdraget tvättas i tvättpåse i tvättmaskin på 60°. Det inre överdraget får inte torkas i torktumlare utan ska hängas upp vid torkning.

### Transport

Cobi Sky är utrustad med fyra bärhandtag. Två på vardera sida av madrassen. Lyft i handtagen vid förflyttning eller transport. Cobi Sky kan ligga sammanrullad i kortare perioder. Fäst ihop den sammanrullade madrassen med det medföljande bandet.

Kontakta Cobi Rehab på  
[info@cobirehab.se](mailto:info@cobirehab.se)  
eller på 08-702 97 74  
om du önskar mer information,  
undervisning, produktvisning  
eller gratis utprovning.

Specifikationer	
Användarvikt	30-110 kg
Längd	2000 mm
Bredd	850 mm
Höjd	150 mm
Madrassens vikt	13 kg
Användbar direkt på justerbar sängbotten	Ja
Brandsäker madrass	Ja
Inkontinensöverdrag	Ja
Allergivänligt och desinficerbart överdrag	Ja
Brandsäkert yttre överdrag	Ja
Beräknad till sårkategori	1-4
Yttre överdrag, grå	44% polyamid, 56% polyuretan
Madrass	Polyamidtyg, expanderade polystyrenkuler och polyesterfiber
Skummadrass, ram	Polyuretanskum, polyesterfiber
ISO-klassifikation	04 33 06-05
Förväntad livstid	5 år
Produktark finns på vår hemsida där den också kan förstoras upp i skrift.	
Generella krav och testmetoder med hänvisning till	DS/EN12182:2012
Grundläggande UDI -DI	5 740 000 108 669
Riskklass	I

Modell	Längd	Bredd	Höjd	Artikelnummer
Cobi Sky madrass	2000 mm	850	150	2100-085-200
<b>Tillbehör</b>				
Överdrag Cobi Sky, grå	2000 mm	850	150	2100-999-010
<b>Reservdelar</b>				
Över- och bottenöverdrag med blixtlås				2100-999-010



# COBI REHAB<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## TILLVERKARE

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## LEVERANTÖR

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
11259 Stockholm  
Sverige  
[www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se)