



COBI REHAB®
The Positioning Company

SERVICEGUIDE

Rollator King / Rollator Support



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.



Servicemanualen innehåller:

1. Rengöring.....	2
2. Underhåll	2
3. Sprängskiss med artikelnummer	3
3.1 Rollator King 0172-050-000/ 0172-071-000	3
3.2 Rollator Support 0173-050-000/0173-071-000	4
4. Tillbehörslista.....	5
5. Monteringsanvisning vid mottagning.....	5
6. Rekonditionering för återanvändning	7
7. Montering av reservdelar	8
7.1 Byte av bromskloss	8
7.2 Byte av bromskabel och handtag.....	8
7.3 Byte av sits	9

1. Rengöring

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Desinficering

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan också desinficeras med 70% ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000–1200 ppm.

Viktigt!

Det **rekommenderas inte** att tvätta rollatorn i tvätt kabinett eller med högtrycksvatten. Skulle detta inträffa, torka rollatorn ordentligt och se till att smörja alla rörliga delar innan rollatorn tas i bruk!

Sits och ryggsäkerhetsstång kan bytas ut när rollatorn ska användas av en ny användare.

⚠ Desinficera alltid rollatorn om den ska användas av en ny användare. Detta för att undvika korskontaminering.

⚠ Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

2. Underhåll

Bultar och vred ska kontrolleras var tredje månad. Spänn åt dem om det behövs. Kontrollera att bromsarna fungerar och smörj eventuellt rörliga delar.

⚠ Bristande underhåll av bromsar, bultar och vred kan leda till funktionsfel och fara för användaren.

3. Sprängskiss med artikelnummer

3.1 Rollator King 0172-050-000/ 0172-071-000



Del nr.	Artikelnummer	Beskrivning
1	0170-999-018	Handtag Höger
1	0170-999-019	Handtag Vänster
1 to 4	0170-999-010R	Komplett körhandtag Höger
1 to 4	0170-999-010L	Komplett körhandtag Vänster
8 to 15	0170-999-060	Komplett Sits
37-41	0170-999-031	Fjäder, bult och mutter
43	0170-999-040	Hjul
45	0170-999-030	Bromskloss
46-48	0170-999-041	Hjulgaffel framhjul
52	0170-999-026	Lås/quick release ryggstång
54+56	0170-999-021	Fingerskruv
65	0170-999-025	Ryggsäkerhetsstång med skum
66	0170-999-050	Korg

3.2 Rollator Support 0173-050-000/0173-071-000



Del nr.	Artikelnummer	Beskrivning
1	0170-999-018	Handtag Höger
1	0170-999-019	Handtag Vänster
1 to 7	0171-999-010	Rollator Support underarmskit
8 to 15	0170-999-060	Sits
37-41	0170-999-031	Fjäder, bult och mutter
43	0170-999-040	Hjul
45	0170-999-030	Bromskloss
46 to 48	0170-999-041	Hjulgaffel framhjul
52	0170-999-026	Lås/quick release ryggstång
54+56	0170-999-021	Finger skruv
65	0170-999-025	Ryggsäkerhetsstång med skum
66	0170-999-050	Korg

4. Tillbehörslista

Artikelnummer	Beskrivning
0170-999-064	Kryck/käpphållare – enkel/ 1 stk
0170-999-065	Kryck/käpphållare – dubbel/ 2 stk


5. Monteringsanvisning vid mottagning

Förutom rullatorn medföljer även två handtag och kablar (bild 1), en förvaringskorg och en säkerhetsstång till ryggstöd (bild 1).

1. Fäll ut rollatorn.
2. Skruva loss skruvarna till höjdjusteringen från handtagsstången.



(Bild 1)

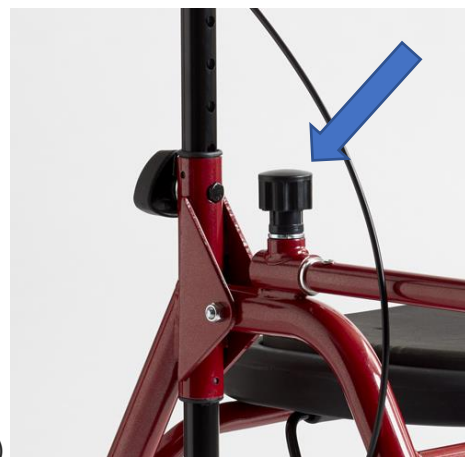

(Bild 2)

3. Montera i handtagsstångerna i rollatorn.
4. Montera ryggsäkerhetsstången på rollatorns framsida genom att dra upp knappen på höger respektive vänster sida, se bild 2. Knappen kan låsas i öppet läge vilket gör det lättare att montera ryggsäkerhetsstångens fäste. Detta görs genom att dra upp ratten och vrida den ett kvarts varv.

Kom ihåg att låta på knappen igen så att ryggsäkerhetsstången sitter fast.

5. Förvaringskorgen monteras framtill genom att hänga upp korgens krokar på det översta röret under sitsen, se bild 3.



(Bild 3)

6. Justera höjden på handtagen så att den passar till användaren, se bild 4.



(Bild 4)

7. Justera bromsarna. Se beskrivning under punkt 4, 7.1 Byte av bromskloss.

⚠ Använd inte rollatorn utan att ryggsäkerhetsstången är fastmonterad.

Rygsäkerhetsstången säkrar att belastningen på rollatorn inte hamnar för långt fram. Om detta skulle ske kan rollatorn tippa framåt.

⚠ Lägg inte kuddar ovanpå den polstrade sitsen när rollatorn används.



6. Rekonditionering för återanvändning

Innan rollatorn tas i bruk av en ny användare kontrollera följande;

1. **Bromsar:** Kontrollera att bromsarna fungerar och att bromsklossar, kablar och handtag är intakta. Behövs bromsarna spännas, bytas ut etcetera, se 5. Monteringsanvisning.



(Bild 5)

2. **Chassi:** Samtliga delar kontrolleras med avseende på sprickbildning eller andra skador.
3. **Hjul:** Kontrollera att hjulen snurrar lätt i rotation och framhjulen också i svängning. Om det behövs, montera av hjulet, gör rent hjul och hjulgaffel och påmontera det igen. Kontrollera sprickbildning och gör en bedömning om hjulet behöver bytas ut.



(Bild 6)

4. **Sits:** Kontrollera att sitsen är intakt eller om den behöver bytas ut. Se i så fall monteringsanvisning.



(Bild 7)

5. **Fäll ihop rollatorn** genom att lyfta sitsen och se till att detta görs i en glidande process. Om detta inte sker, kontrollera om delarna behöver spännas, lossas eller smörjas.

7. Montering av reservdelar

7.1 Byte av bromskloss

1. Montera av hjulet.
2. Tryck upp bromsklossen lite (använd eventuellt en platt skruvmejsel) och dra ut bromskabeln.
3. Lossa nu muttrarna på sidan som håller bromsklossen och byt till den nya bromsklossen. Dra bromskabeln ner i den nya klossen och sätt på hjulet igen.
4. Justera sen bromsen så att klossen är så nära hjulet som möjligt utan att det stöter på. För att justera skruvas på muttern som på bild 8.



(Bild 8)

7.2 Byte av bromskabel och handtag

1. Montera av hjulet.
2. Tryck upp bromsklossen lite (använd eventuellt en platt skruvmejsel) och dra ut bromskabeln så kabeln är lös.
3. Lossa skruven och ta av handtagsstången, se bild 9.



(Bild 9)


4. Montera den nya handtagsstången.



5. Dra bromskabeln ner i bromsklossen klossen, som behöver lyftas lite och sätt sen på hjulet igen.
6. Justera bromsen så att klossen är så nära hjulet som möjligt utan att det stöter på. För att justera skruvas på muttern som på bild 8.

7.3 Byte av sits

1. Lossa de 6 skruvarna under sitsen som håller sitsen på plats.
2. Byt till en ny sits och skruva fast den nya sitsen, spänn åt de 6 skruvarna igen, se bild 9.

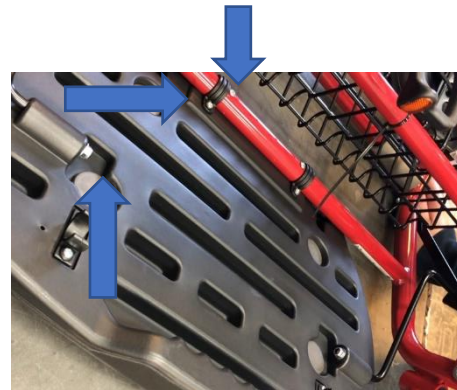

(Bild 9)



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



Tillverkare

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark +45 7025 2522

cobirehab.com

ÅTERFÖRSÄLJARE

Cobi Rehab
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
08- 702 97 74

www.cobirehab.se