



BROSCHYR

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol

En robust dusch- och toalettstol som samtidigt lyfter och tiltar den bariatriska användaren i en 30° lutning. En genomtänkt och säker kombinationsstol som tar hänsyn till både användare och omsorgspersonal i varje hygientsituation.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol används på sjukhus och på omsorgsboenden. Användarvikt upp till 325 kg.



- Broms på alla fyra hjul.
- Kan tvättas i tvätt kabinett.
- Möjlighet att montera extra breda butterfly armstöd.
- Fjärrkontroll ger omsorgspersonal lätt åtgång till de elektriska funktionerna.
- Säkrar för en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonal och en behagligare hygienupplevelse för användaren.
- Justerbar sitthöjd och sittdjup.
- Flera modeller av benstöd.



Användning

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol är framtagen för att kunna lyfta och tilta den bariatriska användaren tillsammans med omsorgspersonal på badhus och i duschrum.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol är avsedd för inomhusbruk på till exempel sjukhus och på omsorgsboenden.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol är framtagen till användare upp till 325 kg med nedsatt fysisk förmåga.

Konstruktion

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol med hjul har en sittbredd på 66 cm. Sitsen är 5 cm hög och tillverkat i PU-skum.

Fotstöden är avtagbara och inställbara i höjd. Fotplattornas placering kan också justeras. Det betyder att användare med mycket hud på insidan av låren ändå kan sitta komfortabelt i stolen.

Under ryggstödet finns en öppning ned till sitsen. Det säkerställer ett bra stöd för ryggen och gör också så att omsorgspersonal kan använda en sele vid placeringen av användaren i stolen.

Funktionella armstöd

Rise N Tilt Dusch och toalettstol har extra långa armstöd (64 cm) som sträcker sig framför sittytan. Det möjliggör i- och urstigning ur stolen lättare för användaren. Armstöden är dessutom avtagbara och svängbara.

Rengöring och underhåll

Rise N Tilt Dusch- och toalettstolens ram, sits och armstöd kan rengöras med vatten ett vanligt rengöringsmedel.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol kan dessutom tvättas i tvättkabinett.

Sitsen kan tas av och desinficeras med etanol 70–85% eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10000 ppm.

Förvaring och transport

När Rise N Tilt Dusch- och toalettstol inte är i bruk bör den förvaras torrt och i en temperatur mellan -10° till +40°C och i en luftfuktighet på max 80%.

Detta gäller också vid långtidsförvaring (+3 månader).

Batteriet bör vara 40–60% laddat innan långtidsförvaringen. Batteriet laddas i minst 10 timmar efter långtidsförvaring.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol kan användas i miljöer med en temperatur från -10° till +40°C.

Manöverkontrollen

Dusch- och toalettstolens lyft- och tiltfunktion styrs av fyra aktuatorer som är placerade under sitsen. Tiltfunktionen aktiveras med manöverkontrollen. Manöverkontrollen kan användas av både användare och omsorgspersonal.

Vid behov av extra sittbredd kan butterfly armstöd användas. De ger ytterligare 14 cm mellan armstöden.

Manöverkontrollen

Manöverkontrollen kan hängas upp på styrbågen, vilket ger omsorgspersonal lätt åtgång till lyft- och tiltfunktionen. Vid ett fullt laddat batteri kan stolen tilta hel upp och ned cirka 15 gånger. Det tar upp till 10 timmar att ladda batteriet.

Om endast 25% återstår av batteriet, kan stolen endast sänkas nedåt. Det säkerställer att användaren alltid kan lyftas ned.

Aktuatorer

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol är utrustad med fyra aktuatorer som finns monterade under sitsen. Det är dessa fyra aktuatorer som gör att Rise N Tilt kan lyfta och tilta.

Manöverkontrollen och kontrollboxen kan desinficeras med etanol 70–85% eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Hantering av batteriet

Batteriets livstid kan förlängas om det laddas upp, även om det inte är helt urladdat.

Om Rise N Tilt inte ska användas under en längre tid (dagar eller veckor), bör batteriet tas ur kontrollboxen, detta för att undvika att batteriet laddas ur helt, något som kan skada batteriet.

Transport

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol är (utan användare) lämplig för land- och/eller lufttransport. Rise N Tilt Dusch- och toalettstol kan inte fällas ihop då ramen är fast.

Rise N Tilt Dusch- och toalettstol tål att lyftas i ramen om den ska transporteras i ett motorfordon.

Specifikationer

Max användarvikt	325 kg
Riskklass	I
Grundläggande UDI DI	5740000100005N4
Förväntad livslängd	7 år
Förväntad hållbarhet batteri	2-3 år
Total längd i lägsta position	1400 mm
Sittbredd	660 mm
Total bredd med standard armstöd/butterfly armstöd	740/850 mm
Bredd mellan standard armstöd/butterfly armstöd	610/750 mm
Sittdjup	420/480/540 mm
Sitthöjd	55 mm
Bredd toalettöppning	Ø 240 mm, 350 mm lång
Avstånd från golv till undersidan av sits/styrbåge	445/1000mm
Avstånd från sits till fotstöd	390/420/440/460/480 mm
Totalvikt Rise N Tilt	46 kg
Svängbara armstöd	Ja
Fotstöd svängbara och höjdställbara	Ja
Upp/ned kapacitet vid fullt laddat batteri	Ca. 15 gånger
Vändradie	1580 mm
Ram	Pulverlackerat krom molybden stål
Låsbara hjul	Ø150 mm med broms
Sits/rygg/armstöd	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX6
ISO-klassifikation	09 12 03 23
Aktuatorer (4 stycken)	LINAK A20/A40
Manöverkontroll/Kontrollbox	LINAK
Riskutvärdering	EN/ISO 14971: 2012
Generella krav och testmetoder	EN 12182, EN/ISO 10535
Yttemperaturen på Rise N Tilt Dusch- och toalettstol kan stiga eller falla om den utsätts för extrem köld- eller värmepåverkan.	

Beställning, tillbehör och reservdelar

Modell, tillbehör och reservdelar	Artikelnummer
Rise N Tilt Dusch- och toalettstol (sittbredd 66 cm) med standardarmstöd, standard fotstöd, laddare, nackstöd och bäckenhink	0157-066-000
Butterfly armstöd höger (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012R
Butterfly armstöd vänster (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012L
Nackstöd justerbart	0156-999-020
Sits helt med lock för Rise N Tilt Dusch- och toalettstol	0150-999-023
Bäckenhink med lock plast	0140-999-001
Fotstöd standard Rise N Tilt Dusch- och toalettstol höger	0156-999-090H
Fotstöd standard Rise N Tilt Dusch- och toalettstol vänster	0156-999-090V
Höjdställbart benstöd för Rise N Tilt Dusch- och toalettstol höger	0156-999-030
Höjdställbart benstöd för Rise N Tilt Dusch- och toalettstol vänster	0156-999-031
Batteri till Rise N Tilt Dusch- och toalettstol	0156-999-050

