



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## BRUKSANVISNING

# Bariatrisk Comfort Sittdyna

**Dansk designad standardsittdyna till rullstol utvecklad till att förebygga trycksår hos bariatrisk användare.**

Comfort Sittdyna är avsedd för användare som väger upp till 325 kg.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn och tvångsarbete samt ILO 029, C132 och C182.

# Innehållsförteckning

1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring .....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning .....	5
5. Mer användning .....	5
6. Långtidsförvaring.....	6
7. Rengöring och underhåll.....	6
8. Bortskaffning .....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer.....	8
11. Beställning .....	8

# 1. Säkerhet

---



## VARNING

Comfort Sittdyna får inte användas utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användandet av sittdynan. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan sittdynan används. Rikta speciellt uppmärksamheten mot säkerhetsvägledningar markerade med

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Comfort Sittdyna.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om sittdynan är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.



## SÄKERHETSVÄGLEDNING

Comfort Sittdyna kan skadas eller orsaka personskada om den används av en användare som väger mer än 325 kg.

Lägg inte ytterligare lager eller vaddering mellan kudden och användaren eftersom detta kan minska effekten av kudden.

En våt eller defekt Comfort Sittdyna kan minska effekten av trycksårsprevention och i värsta fall orsaka personskador.

Desinficera alltid Comfort Sittdynan innan en ny användare sitter på den. Detta bör göras för att undvika korskontaminering.

Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller påverka prestandan hos Comfort Sittdyna.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab Artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
CE-märkning finns på sittdynans förpackning. Exempel på etikett kan ses nedan.	



## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av Comfort Sittdyna för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Comfort Sittdyna.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning

---

Comfort Sittdyna är en standard rullstolsdyna för att förebygga trycksår hos bariatrisk användare.

Comfort Sittdyna består av ett tre cm viskoelastisk skumlager upptill. I botten finns ett Heavy Duty PUR-skumlager, skuret i fjädrar.

Upphängningssystemet är patenterat och ser till att trycket fördelas till en större yta, vilket ökar tryckavlastningen.

Det medföljande inkontinensöverdraget är tillverkat av Dartex-material. Inkontinensöverdraget är andningsbart, antibakteriellt och brandhämmande.

**⚠** Comfort Sittdyna kan skadas eller orsaka personskada om den används av en användare som väger över 325 kg.

Comfort Sittdyna används i rullstolar på sjukhus, på äldreboenden och i privata hem.

Konsultera alltid en förskrivare innan Comfort Sittdyna rekommenderas till en användare.

### **Kontraindikationer**

Det finns inga kontraindikationer i samband med användningen av produkten.

## 5. Mer användning

---

### **Innan användning**

Placera Comfort Sittdynan i en rullstol eller i en stol så att dragkedjan är vänd nedåt. Kontrollera att dragkedjan på överdraget på Comfort Sittdyna är korrekt uppdragen.

Lägg inte ytterligare lager eller vaddering mellan dynan och användaren eftersom detta kan minska effekten av sittdynan.

### **Under användning**

Kontrollera rullstolsdynan regelbundet för att säkerställa att dynan och överdraget är rätt vända och att dynan inte är våt eller defekt.

**⚠** En våt eller defekt Comfort Sittdyna kan minska effekten av trycksårsprevention och i värsta fall orsaka personskador.

## 6. Långtidsförvaring

---

Comfort Sittdyna bör förvaras mörkt och i temperaturer mellan -10 ° - 50 ° C.

## 7. Rengöring och underhåll

---

Comfort Sittdyna kan inte tvättas i maskin.

Inkontinensöverdraget kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel. Överdraget kan även maskintvättas i 95°C och torktumlas.

### Desinfektion

Comfort Sittdyna kan även desinficeras med till exempel Wet Wipe 70% eller en klorprodukt 1000–1200 ppm (t.ex. Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficera alltid Comfort Sittdynan innan en ny användare. Detta bör göras för att undvika korskontaminering.

Lokala rutiner för rengöring och underhåll måste alltid följas.

## 8. Bortskaffning

---

När Comfort Sittdyna inte längre är i bruk ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffningen.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att Comfort Sittdyna är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan finnas skador eller saknas något på dynan vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Comfort Sittdyna är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.
- produkter där det gjorts en reparation av icke auktoriserad personal.

Garantien omfattar inte:

- slitagedelar.

### 9.1 Oförutsedda händelser

Varje incident som inträffar i samband med användningen av Comfort Sittdyna ska meddelas till Cobi Rehab.

### 9.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet för produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten använts och hur sliten den är.

Den samlade bedömningen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att Comfort Sittdynan blivit hanterad på ett felaktigt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och använda reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller påverka prestandan hos Comfort Sittdyna.

hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning.

## 10. Specifikationer

Max användarvikt	325 kg
Vikt	2 kg
Sittbredd	550/610/660/720/820 mm
Sittdjup	450 mm
Höjd	120 mm
Material	HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum
Inkontinensöverdrag	Dartex
ISO - klassifikation	18 10 06 01
Förväntad livslängd	3 år
Riskklass	I
Grundläggande UDI	5740000100011MX
Yttemperaturen på sittdynakan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 11. Beställning

Modell	Bredd cm	Djup x höjd cm	Artikelnummer
Comfort Sittdyna med inkontinens överdrag	55	45 x 12	0230-055-045
Comfort Sittdyna med inkontinens överdrag	61	45 x 12	0230-061-045
Comfort Sittdyna med inkontinens överdrag	66	45 x 12	0230-066-045
Comfort Sittdyna med inkontinens överdrag	72	45 x 12	0230-072-045
Comfort Sittdyna med inkontinens överdrag	82	45 x 12	0230-082-045
Inkontinensöverdrag	55		0230-055-001
Inkontinensöverdrag	61		0230-061-001
Inkontinensöverdrag	66		0230-066-001
Inkontinensöverdrag	72		0230-072-001
Inkontinensöverdrag	82		0230-082-001





# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## **TILLVERKARE**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## **LEVERANTÖR**

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
112 59 Stockholm  
08-702 97 74

[WWW.cobirehab.se](http://WWW.cobirehab.se)