



### Aktuatorer

Tilt är utrustad med två aktuatorer, placerade under sitsen. De två aktuatorerna ser till att stolen kan lutats.

Ta inte ut batteriet från kontrollboxen förrän fem sekunder efter att den sista aktuatoren har stannat. Sker detta måste stolen kalibreras för att fungera igen. **Se Felsökning.**

Om en eller båda aktuatorerna går snett, stänger kontrollboxen ner dem. Om detta händer måste stolen kalibreras. **Se Felsökning.**

### Felsökning

Vid driftsproblem är det viktigt att kontrollera att de tre kontakterna från fjärrkontrollen och aktuatorerna sitter korrekt i kontrollboxen.

Om aktuatorerna inte fungerar måste stolen 0-punkt kalibreras.

### 0-punkts kalibrering

En manuell 0-punktskalibrering görs genom att hålla ned "Pil-knappen" i ca. 20 sekunder tills ett mekaniskt motorljud hörs från kontrollboxen.

Släpp knappen när sätet är i bottenläge.

Kalibreringen är nu klar och aktuatorerna kan köra igen.

### Batteri- eller laddningsfel

Vid fel på laddaren eller batteriet blinkar dioden rött.

Ta ut sladden ur uttaget. Vänta två minuter och anslut sedan sladden igen.

Om dioden fortfarande blinkar rött kan det bero på ett fel i laddaren eller batteriet.

Kontakta gärna Cobi Rehab på 08-702 97 74 vid driftsproblem.

### Låg batterinivå

 Dioden på kontrollboxen blinkar inte rött när batterinivån är låg.

Därför rekommenderas att batteriet laddas varje dag efter användning.

Ha alltid ett laddat reservbatteri tillgängligt så ett eventuellt driftstopp undviks. (Senast uppdaterad 2024-01).



## QUICK GUIDE

# Tilt Dusch- och toalettstol

## Laddning och drift

### Förberedelse

Ladda batteriet i den tillhörande laddaren. Laddaren lyser rött under laddning och grönt när batteriet är fulladdat. Det tar upp till 10 timmar att ladda batteriet.

När batteriet sätts in i kontrollboxen blinkar dioden rött i en sekund. Det röda ljuset ersätts av ett fast grönt och ett litet pip. Efter ett tag ersätts det fasta ljuset av ett sporadiskt blinkande grönt ljus.

Stolen ska alltid kalibreras när batteriet har tagits ur kontrollboxen.

Ladda batteriet varje dag efter användning.

### Tung belastning av batteriet

Tung belastning av batteriet (många gånger upp och ner i följd) innebär att batteriet blir för varmt och att säkerhetstermostaten i batteriet aktiveras.

Det innebär att kontrollboxen stängs av och att batteriet måste svalna i minst en halvtimme innan det kan användas igen. Vänta minst en minut innan du sätter i ett annat batteri i kontrollboxen.

Ha alltid ett laddat reservbatteri tillgängligt.



Batteri, kontrollbox och fjärrkontroll.