



Nackstöd



Material

Armen på nackstödet består av utbytbara och kraftiga kulleleder i aluminium med en keramisk yta. Nackstödsplattan är i aluminium. Kullelederna säkrar flexibilitet utan att nackstödet rör sig, när den är åtskruvad i önskad position.

På nackstödet sitter en skumbas i neopren och en mjuk kudde med tre kamrar fyllda med EPS-kulor och viskoelastiskt skum.

Man kan justera fyllningen i de tre kamrarna på nackstödsudden individuellt utefter användarens behov.

Nackstödsudden kan bytas ut när rullstolen ska återanvändas till en ny användare.

Artikelnummer

Nackstöd, M: 0350-999-041

Nackstöds kudde, M: 0350-999-471

Överdrag till nackstöd, M: 0350-999-551

Användning

Nackstödet är utvecklat till Kamille Komfortrullstol, men kan också användas på andra rullstolar. Kontakta Cobi Rehab på telefonnummer 08-702 97 74, för mer information.

Nackstödet stöttar användarens huvud och bidrar till huvudstabilitet. Optimal huvudstabilitet kan förbättra användarens problem vid till exempel kommunikation, syn eller matsituation.

Montering och justering

Armen på nackstödet består av utbytbara och kraftiga kulleleder.

Kullelederna skruvas fast med en sexkantsnyckel.

Nackstödet kan både centreras och vinklas till höger eller vänster utefter användarens behov.

De individuella kamrarna på nackstödsudden kan justeras individuellt utefter användarens behov. På varje kammare sitter ett blixtlås som man kan öppna för att fylla eller ta ur fyllning.

Justering av fyllningsmängden ska ske utefter en utvärdering och vägledning av behörig personal.

Underhåll och rengöring

Nackstödsudden kan torkas av med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Nackstödsudden kan också tömmas helt och tvättas i tvättpåse i maskin på skonsam tvätt max 60°C.

Betræk til nakkestøtten kan vaskes ved max 60°C. Betrækker kan ved behov tørretumbles ved svag varme.

⚠ Kuddar med fyllning får aldrig tvättas i maskin. **!**

Desinfektion

Nackstöds kudde och nackstödsarmen kan också desinficeras med till exempel Wet Wipe 70% eller en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid Kamille Komfortrullstol när den ska återanvändas till en ny användare. Detta skall göras för att begränsa korskontamination.