



## Omfamnararm



### Underhåll och rengöring

Överdrag till Kamille Omfamnararmar kan tvättas i maskin på max 60°C. Överdraget får ej torktumlas.

Kuddarna kan avtorkas med mildt rengöringsmedel och vatten.

Kuddarna kan tömmas helt på fyllning och tvättas i tvättpåse i maskin på skonsam tvätt och max 60°C.

**⚠** Kuddar med fyllning får ej tvättas i maskin!

Alla kuddar kan bytas ut när produkten går vidare till en ny användare.

### Desinfektion

Chassi, kuddar och körbåge kan desinficeras med t ex Wet Wipe 70% eller en klorprodukt 1000-1200 ppm.

**⚠** Desinficera alltid Kamille Komfortrollstol om den ska återanvändas till en annan användare. Detta ska göras för att undvika korskontamination.

Eventuella lokala förhållningsregler gällande rengöring och hygien ska alltid följas.

### Material

#### Omfamnararm med tyngd

Omfamnararm med tyngd innehåller en blandning av EPS-kulor, tyngdgranulat och viskoelastiskt skum, som tillsammans bidrar till en ökad taktill stimuli och understöd av armar, händer och skuldror.

Vikt: 1,7 kg/st.

#### Omfamnararm utan tyngd

Omfamnararm utan tyngd innehåller en blandning av EPS-kulor och viskoelastiskt skum, som tillsammans ger en ökad taktill stimuli och understöd för armar, händer och skuldror.

Vikt: 0,5 kg/st

### Montering och justering

Omfamnararmarna sätts fast på körhandtag, eller liknande passande plats, med ett klickspänne.

Justering av fyllningsmängden görs genom att öppna blixtlåset och ta bort eller fylla på fyllning.

Justering av fyllningsmängden sker efter en utvärdering och vägledning av behörig personal.

Omfamnararmar kan användas på andra rullstolar utan verktyg eller anpassningar.

### Artikelnummer

Omfamnararm med tynd, höger: 0350-999-430

Omfamnararm med tyngd, vänster: 0350-999-431

Omfamnararm, höger: 0350-999-432

Omfamnararm, vänster: 0350-999-433

Överdrag till Omfamnararm, hö: 0350-999-575H

Överdrag till Omfamnararm, vä: 0350-999-575V