



Elektriska funktioner

Rullstolen väcks från "dvala" genom att trycka på en slumpmässig knapp på manöverdosan.

Fjärrkontroll

Överst på manöverdosan finns batteriindikatorn. Ladda rullstolen när batteriet blinkar i det röda fältet.

Under batteriindikatorn på manöverdosan finns rygglutningsfunktionen. Piltangenterna styr rygglutningsfunktionen från 96°-131°.

Av säkerhetsskäl är rygglutningsfunktionen låst. Se bruksanvisningen för mer information.

Nedanför rygglutningen är tiltfunktionen. Sitsen (och rygg) kan lutats från 0° - 45°.

Använd alltid tilt- och lutningsfunktionerna försiktigt för att undvika snabba ryck.

Det finns två ställdon under sitsen på Kamille; ett sätesställdon och ett ryggställdon.

Om ställdonen "stannar" måste rullstolen resettas. Var uppmärksam på om båda ställdonen är i gång under RESET.

Bromsar

Bromsarna manövreras med hjälp av ett bromshandtag monterad på körbygeln.


Daglig rengöring av rullstolen

Rullstolens ram, sits och armstöd rengörs med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Sittdyna och kuddar kan desinficeras med etanol 70-85% eller en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Manöverdosan kan desinficeras med samma produkter som kuddarna.

(Senast uppdaterad mars 2024).

 Risk för klämning av brukare vid justeringar.



RESET - manöverdosan

Tryck ned båda piltangenterna, markerade med en röd prick i 5 sekunder. De två ställdonen kör nu ned.

När RESET är klar fungerar de elektriska funktionerna igen.

QUICK GUIDE

Kamille Komfortrollstol

Guide till användning av Kamille komfortrollstol

Så här laddar du rullstolen

Rullstolen laddas när kabeln från kontrollboxen är ansluten till ström. En full laddning tar upp till sex timmar. Ladda rullstolen vid mottagande.

När dioden med stickkontakten på fjärrkontrollen lyser, betyder det, att rullstolen har ström och laddas.

Till vänster om dioden med stickkontakten på fjärrkontrollen finns batteriindikatorn. Ladda rullstolen när dioden blinkar i det röda fältet.

Siffrorna 25, 50 och 100 på fjärrkontrollen indikerar, hur många procent, batteriet är laddat.



Börja använda rullstolen

Bedöm om det finns behov av att justera fyllning i kuddarna när brukaren sitter i rullstolen.

Körbygelns vinkel justeras med tumskruvar på höger och vänster sida av körbygeln. Höjden justeras med de två handtagen på baksidan. Armstöden justeras i höjd och vinkel med hjälp av tumskruvar på sidorna.

Benstöden kan justeras i höjd och position. Benstöden har även en swing away-funktion.

Vinkeln på fotplattan och benstödet samt vinkeln på vadplattan kan justeras med verktyg.

Skanna koden och få mer information om Kamille Komfortrollstol.



CRASH TESTED
ISO 7176-19