



COBI REHAB®
The Positioning Company

PRODUKTARK

Dusch- och toalettstol med sitstilt

En robust dusch- och toalettstol som tiltar den bariatriska användaren till en 30° lutning. En genomtänkt och säker kombinationsstol som tar hänsyn till både användare och omsorgspersonal i varje hygiensituation.

Dusch- och toalettstol med tilt används på sjukhus och omsorgsboenden. Brukarvikt 325 kg.



- Bromsar på alla fyra hjul.
- Möjlighet till extra breda butterfly armstöd.
- Fjärrkontroll ger omsorgspersonal lätt åtgång till tiltfunktionen.
- Säkrar en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonal och en behagligare samt säkrare upplevelse för användaren.
- Justerbar sitshöjd och sitsdjup.
- Flera modeller av benstöd.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

Användning

Dusch- och toalettstol med Tilt är framtagen för att kunna tilta den bariatriska användaren vid hygiensituationer på badhus och i duschrum.

Dusch- och toalettstol med Tilt är framtagen för inomhusbruk på till exempel omsorgsboende och sjukhus.

Dusch- och toalettstol med Tilt klarar användare som väger upp till 325 kg och som har en nedsatt fysisk förmåga.

Konstruktion

Dusch- och toalettstol med Tilt och hjul har en sittbredd på 66 cm. Sätet är fem cm högt och tillverkat i PU-skum.

Fotstöden är avtagbara och inställbara i höjd. Fotplattornas placering kan också justeras. Det gör så att användare med mycket hud på undersidan av låren kan sitta komfortabelt i stolen.

Under ryggstödet finns en öppning ned till sitsen. Det säkerställer ett bra stöd för ryggen och gör också så att omsorgspersonal kan använda en sele vid placeringen av användaren i stolen.

Funktionella armstöd

Dusch- och toalettstol med Tilt har extra långa armstöd (64 cm) som sträcker sig framför sittytan. Det gör i- och urstigning lättare för användaren. Armstöden är dessutom avtagbara och svängbara.

Rengöring och underhåll

Dusch- och toalettstolens ram, sits och armstöd kan rengöras med vatten och ett allmänt rengöringsmedel.

Sitsen kan tas bort och desinficeras med etanol 70–85% eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Fjärrkontrollen och kontrollboxen kan desinficeras med etanol 70–85% eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Förvaring och transport

När Dusch- och toalettstol med Tilt inte är i bruk bör den förvaras torrt och i en temperatur mellan -10° till +40°C och i en luftfuktighet på max 80%. Detta gäller också vid långtidsförvaring.

Dusch- och toalettstol med Tilt kan användas i omgivningar med en temperatur från -10° till +40°C.

Manöverkontroll

Dusch- och toalettstolens tiltfunktion styrs av två aktuatorer som finns under stolens sits. Tiltfunktionen aktiveras med manöverkontrollen. Manöverkontrollen kan användas av både användare och omsorgspersonal.

Vid behov av extra sittbredd kan butterfly armstöd användas. De ger ytterligare 14 cm mellan armstöden.

Manöverkontrollen

Manöverkontrollen kan hängas på styrbågen och ger omsorgspersonal lätt åtgång till tiltfunktionen. Vid ett fullt laddat batteri kan stolen tiltahelt upp och ned cirka 20 gånger.

Aktuatorer

Dusch- och toalettstol med Tilt är utrustad med två aktuatorer monterade under sitsen. Det är dessa två aktuatorer som gör att stolen kan tilta.

De två aktuatorerna ska kalibreras innan stolen tas i bruk för första gången.

Hantering av batteri

Batteriets livslängd kan förlängas om det laddas upp, även om det inte är helt urladdat.

Om kontrollboxen inte ska användas under en längre tid (dagar och veckor), bör batteriet tas ur ur kontrollboxen, detta för att undvika att batteriet laddas ur helt, något som skadar batteriet.

Transport

Dusch- och toalettstol med Tilt är (utan användare) lämplig för land- och/eller lufttransport. Stolen kan inte fällas ihop då ramen är fast.

Dusch- och toalettstol med Tilt tål att lyftas i ramen om den ska transporteras i ett motorfordon.

Specifikationer

Max användarvikt	325 kg
Riskklass	I
Grundläggande UDI DI	5740000100005N4
Förväntad livslängd	7 år
Förväntad hållbarhet batteri	2-3 år
Totallängd i lägsta position	1400 mm
Sittbredd	660 mm
Totalbredd med standard armstöd/butterfly armstöd	740/850 mm
Bredd mellan standard armstöd/butterfly armstöd	610/750 mm
Sittdjup	420/480/540 mm
Sitthöjd	55 mm
Bredd toalettöppning	Ø 240 mm, 350 mm lång
Avstånd från golv till undersida av sits	445 mm
Avstånd från golv till körbåge	1000 mm
Avstånd från sits till fotstöd	390/420/440/460/480 mm
Totalvikt Dusch- och toalettstol med Tilt	39 kg
Svängbara armstöd	Ja
Fotstöd svängbara och höjdinställbara	Ja
Upp/ned kapacitet vid fullt uppladdat batteri	Ca. 20 gånger
Vändradie	1580 mm
Ram	Pulverlackerad krom molybden stål
Låsbara hjul	Ø150 mm med broms
Sits/rygg/armstöd	Polyuretan
IP-klassifikation	IPX4
ISO-klassifikation	09 12 03 22
Aktuatorer (2 stycken) /kontrollbox	Concens
Fjärrkontroll	Concens
Risikutvärdering	EN/ISO 14971: 2012
Generella krav och testmetoder	EN 12182:2012, EN/ISO 10535:2006
Yttemperaturen på Dusch- och toalettstol med Tilt kan stiga eller falla om den utsätts för extern köld- eller vämepåverkan.	

Beställning, tillbehör och reservdelar

Modell, tillbehör och reservdelar	Artikelnummer
Dusch- och toalettstol med Tilt (sittbredd 66 cm) med standardarmstöd, standard fotstöd, laddare, nackstöd och bäckenhink	0155-066-000
Butterfly armstöd höger (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012R
Butterfly armstöd vänster (ger 7 cm extra bredd mellan armstöden)	0150-999-012L
Sits helt med lock till Dusch- och toalettstol med Tilt	0150-999-023
Bäckenhink med lock plast	0140-999-001
Fotstöd standard Dusch- och toalettstol höger	0156-999-090H
Fotstöd standard Dusch- och toalettstol vänster	0156-999-090V
Höjjusterbart benstöd till Dusch- och toalettstol höger	0156-999-030
Höjjusterbart benstöd till Dusch- och toalettstol vänster	0156-999-031
Batteri till Dusch- och toalettstol med Tilt	0156-999-050

