



COBI REHAB®
The Positioning Company

Elektriska funktioner

Rullstolen aktiveras från viloläge genom tryck på valfri knapp på manöverdosan.

Manöverdosan

Överst på manöverdosan ses batteriindikatorn. Ladda rullstolen när batteriindikatorn blinkar i det röda fältet.

Rullstolen laddas när kabeln till kontrollboxen är ansluten till ett eluttag. En full uppladdning kan ta upp till sex timmar. Ladda Kamille Komfortrullstol vid leveransen.

Under batteriindikatoen på manöverdosan finns justeringen av ryggvinkeln. Pilarna styr justeringen av vinkeln från 96°-131°.

Av säkerhetsmässiga skäl är ryggtiltfunktionen låst. För att använda denna ska den vänstra ryggjusteringsknappen och den högra tiltfunktionsknappen hållas in i 10 sek. Ett pip bekräftar att funktionen kan tas i bruk. Efter 30 sekunders inaktivitet låses funktionen igen.

Under ryggjusteringsknappen finns tiltfunktionen. Sitsen på Kamille Komfortrullstol kan tiltas från 0° - 45°.

Använd alltid ryggjusteringsknappen och tiltfunktionen försiktig så att stolen inte rycker till. Det finns två aktuatorer under sitsen på Kamille Komfortrullstol.

En sitsaktuator och en ryggaktuator. Om aktuatorerna stannar ska fjärrkontrollen återställas (RESET).

Var uppmärksam på att bägge aktuatorerna rör sig under RESET.

Bromsar

Bromsarna är monterade på körbågen.

Daglig rengöring av rullstolen
Rullstolens ram, sits och armstöd rengörs med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Kuddarna kan tas bort och desinficeras med ytdesinfektion eller med en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10000 ppm.

Manöverdosan kan desinficeras med samma produkter som kuddarna.

 Klämningsrisk finns för användare i stolen under justeringar.



RESET - manöverdosan
Håll in bägge piltangenterna markerad med röd prick i 5 sekunder. Detta får de två aktuatorerna att köra ned i botten. När RESET är gjord fungerar de elektriska funktionerna igen.

QUICK GUIDE

Kamille Komfortrullstol

Guide till förflyttning, elektriska funktioner och uppladdning.

Placera brukaren i rullstolen

1. "Puffa" till kuddarna och kontrollera överdragen.
2. Använd manöverdosan för att anpassa sitttilten efter behov.
3. Använd manöverdosan för att anpassa ryggvinkel efter förskrivarens instruktioner.
4. Placera brukaren i stolen.
5. Se till att brukaren kommer långt bak i stolen och får bra stöd över hela kroppen.
6. Kontrollera och anpassa/justera kuddarna och eventuella tillbehör efter behov.

Använda rullstolen

Avgör om det finns behov för extra fyllning i kuddarna när användaren sitter i rullstolen.

Körbågens vinkel justeras med hjälp av fingervreden på höger och vänster sida av körbågen. Höjden justeras genom att använda de två klämspakarna som finns placerade på baksidan av ryggen.

Armstöden justeras i höjd och vinkel med hjälp av ett fingervreden på sidan.

Benstöden kan ställas in i höjd och vinkel. Benstöden har också en swing away funktion.

Fotplattan, benstödens och vadplattans vinkel kan justeras med hjälp av ett verktyg.

Skanna QR-koden för att få mer information om Kamille Komfortrullstol.

